



# ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO

**ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO** é indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

---

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

---

- ❖ Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas: *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*.
- ❖ Indicado para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos;
- ❖ Menor custo real por poder e tempo de desinfecção;
- ❖ Produto biodegradável.

---

## MODO DE USAR

---

Preparar uma solução na concentração de 1:24, ou seja, diluir 1mL do **ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO** em 24mL de água.

**Para desinfecção de superfícies fixas:** Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar a solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

**Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar. Utilizá-los o mais breve possível.

**Importante:** Por ser um oxidante forte e muito reativo é preciso tomar precauções ao manipular o produto. **Utilizar EPI's (botas, luvas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.** Manusear com ventilação adequada. Não é corrosivo à superfície de aço inox, alumínio, estanho, zinco, teflon, polietileno, revestimentos sintéticos, esmaltados ou borrachas. Evitar contato com material orgânico: madeira, papelão, cobre e bronze.

---

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

---

**Aparência:** Líquido Límpido

**Cor:** Incolor

**Odor:** Característico

**pH (tal qual):** 0,0 – 3,0

**Concentração de Ácido Peracético:** 4,5 – 5,5%

---

## COMPOSIÇÃO

---

Peróxido de hidrogênio, Ácido acético, acidificante, estabilizante e veículo.

---

## CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

---

**PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA A EMBALAGEM PROTEGIDA DO SOL E DO CALOR.** Temperaturas elevadas podem desestabilizar o produto. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso.

---

## PRECAUÇÕES

---

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO.** Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água

---

FABRICADO POR:

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

FONE: (34) 3292-6100 - [sac@startquimica.com.br](mailto:sac@startquimica.com.br)

[www.startquimica.com.br](http://www.startquimica.com.br)



# ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO

durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém peróxido de hidrogênio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. **“Água: pode faltar. Não desperdice.”**

---

## PRAZO DE VALIDADE

---

06 meses a partir da data de fabricação.

---

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

---

5L.

---

## REGISTRO

---

REGISTRO MS: 3.1282.0049.

---

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831