	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>Código</b>	FT 36
		<b>Data de elaboração</b>	17/08/2021
		<b>Data de efetivação</b>	18/08/2021
		<b>Revisão</b>	00
		<b>Página</b>	1 de 2

## ÁLCOOL 70% START

### **FINALIDADE**

---

**ÁLCOOL 70% START** é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

---

- Desinfeta as superfícies fixas de ambientes como pisos, paredes e bancada e na desinfecção de artigos não críticos;
- Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis* e *Staphylococcus aureus*;
- Produto biodegradável.

### **MODO DE USAR**

---

**Para desinfecção de superfícies fixas:** Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

**Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar os artigos com o produto deixando-o umedecido por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

**Atenção:** Não derramar sobre o fogo. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool como: superfícies pintadas, enceradas ou envernizadas. Evitar deixar em contato com material sensível. Não é indicado o uso em acrílico, pode enrijecer borracha, tubos plásticos e pode danificar o cimento das lentes de equipamentos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS**

---

**pH (tal qual):** 6,0 - 9,0  
**Teor Alcoólico (° GL):** 75,37 - 78,49  
**Aparência:** Líquido Límpido  
**Cor:** Incolor  
**Odor:** Característico

### **COMPOSIÇÃO**

---

Álcool etílico e água.  
**Princípio Ativo:** Álcool etílico 70% p/p.


### **CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM**

---

Manter o produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem bem fechada e ao abrigo da luz e calor. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter afastado do fogo e do calor.

### **PRECAUÇÕES**

---

 <b>LIMA &amp; PERGHER S/A</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>Código</b>	FT 36
		<b>Data de elaboração</b>	17/08/2021
		<b>Data de efetivação</b>	18/08/2021
		<b>Revisão</b>	00
		<b>Página</b>	2 de 2

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica Atendimento 24 horas: Fone 0800 0148 110. "Água: pode faltar. Não desperdice".

### **PRAZO DE VALIDADE**

---

36 meses a partir da data de fabricação.

### **EMBALAGENS DISPONÍVEIS**

---

500ml, 1L e 5,1L

### **REGISTRO**

---

REGISTRO MS: 3.1282.0315.

### **DADOS DO FABRICANTE**

---

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  
 Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80  
 Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ  
 Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03  
 Av. Airton Borges da Silva, 1639  
 Compl.: Galpão 1 - Módulo 1 - CEP: 38.402-333 - Uberlândia - MG  
 INDÚSTRIA BRASILEIRA  
 Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831  
 Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6  
 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100  
[sac@startquimica.com.br](mailto:sac@startquimica.com.br)