



HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START é um desinfetante bactericida indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Indicado para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos;
- ❖ Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas: *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*.
- ❖ Menor custo real por poder e tempo de desinfecção;
- ❖ Desinfetante de uso hospitalar;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o **HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START** deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário. **Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no **HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START** puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar. Utilizá-los o mais breve possível.

Importante: Use luvas ao manusear o produto.

ATENÇÃO: Não utilizar em superfícies metálicas e mármore devido a oxidação causada pelo cloro. Não misturar com produtos ácidos e produtos à base de amônia. Não utilizar para a desinfecção de água para consumo humano e alimentos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Levemente Amarelado

Odor: Característico

pH (tal qual): 10,5 – 13,5

Teor de Cloro Ativo: 0,85 – 1,15%

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo os respingos do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1L e 5L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0309

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831