



START DESINCROST INOX

START DESINCROST INOX é um detergente desincrustante ácido revitalizador de uso corretivo.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Especialmente desenvolvido para remoção de ferrugem, crostas e oxidações de instrumentais cirúrgicos, odontológicos, oftálmicos e materiais de laboratório em inox;
- ❖ Resgata o estado padrão dos instrumentos deixando-os com aparência de novos e ao mesmo tempo preservando e conservando;
- ❖ Libera articulações, elimina oxidações e placas minerais;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto.

Diluir 1L de **START DESINCROST INOX** para 5 a 6L de água quente (60 a 80° C). Mergulhar os instrumentos por 10 a 15 minutos na solução, expondo suas zonas críticas, escovar com escova não metálica e enxaguar. Para instrumentos com muita incrustação, repita a operação com uma nova solução.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 0,0 – 2,0

Aspecto: Líquido

Cor: Castanho Avermelhado

Odor: Característico

COMPOSIÇÃO

Ácido Fosfórico, sinergista, tensoativo não iônico, solvente, dispersante, sequestrante, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. NÃO provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém ácido fosfórico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. **ATENÇÃO:** NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS. NÃO UTILIZAR EM INSTRUMENTOS DE PRATA OU CROMADOS.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0039

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

FABRICADO POR:

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br

www.startquimica.com.br